



Governo do Estado de Mato Grosso
SES-Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso-LACEN/MT

ENVIO DE LÂMINAS PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR – LT/ LACEN-MT

1. O envio das lâminas de Leishmaniose para o Controle da Qualidade deve começar com o cadastramento no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial).
2. As lâminas devem respeitar a padronização normatizada na Nota Técnica nº01 , conforme as orientações sobre a análise laboratorial de Leishmaniose Tegumentar e seu controle de qualidade, contidas neste site.
3. Utilizar lâmina de ponta fosca, identificada a lápis, com a sequência numérica iniciando-se com o número 01, em janeiro, e terminando com o número alcançado ao fim do exercício do ano. O envio deve ser mensal de todas as lâminas positivas e negativas. Encaminhar as lâminas até o 20º(Vigésimo) dia do mês subsequente. O LACEN/MT tem até 45 (quarenta e cinco) dias para informar o resultado da revisão das lâminas enviadas para o Controle de Qualidade. Havendo divergência no resultado da leitura, o laboratório tem 90 (noventa) dias (três meses) para recorrer da discordância.
4. As normas da Qualidade e Biossegurança mandam que o formulário de cadastro com o número de protocolo do GAL, não seja usado como embalagem das lâminas; por isso, elas devem ser acondicionadas em caixas apropriadas. Na falta de caixa, podem ser usados envelopes dotados de certa resistência a rupturas, conforme indicado do site.
5. As embalagens de lâminas de Leishmaniose não podem conter lâminas de outros agravos.
6. O envio deve ser feito para o escritório regional de saúde ao qual o município esteja jurisdicionado.
7. O escritório regional de saúde agrupará as fichas dos municípios e as encaminhará ao Lacen – MT.
8. Efetuar o seguinte endereçamento:



Governo do Estado de Mato Grosso
SES-Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso-LACEN/MT

PARA: LACEN/MT

SETOR: Controle de Qualidade de Lâminas

ENDEREÇO: Ac. G, 79 – Centro Político Administrativo, nº 70, Cuiaba -MT - CEP 78050-903

E-MAIL: gavelacen@ses.mt.gov.br